

Mighty⁺

MEDIC

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η **πιστοποιημένη συσκευή** MIGHTY+ MEDIC είναι μια φορητή ατμοποιητική συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία και φέρει Μονάδα Ψύξης. Διαθέτει επιπλέον μια ψηφιακή οθόνη με ένδειξη απαιτούμενης και πραγματικής θερμοκρασίας, καθώς και κατάστασης μπαταρίας.

Εξοπλισμός

Η πιστοποιημένη συσκευή MIGHTY+ MEDIC αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία/παραδοτέα.



1. Ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC. 2. USB-C Supercharger (αντικαθιστά το παλιό τροφοδοτικό). 3. 3 τμχ. Κανονικό Κόσκινο (μικρό) & 3 τμχ. Μεγάλο Κόσκινο (μικρό). 4. 3 τμχ. Στεγανοποιητικός Δακτύλιος Πλάτου (μικρός). 5. 1 τμχ. Γεμιστήρας για Κάψουλες Δοσολογίας. 6. 1 τμχ. Μύλος Βοτάνων. 7. 1 τμχ. Πινέλο Καθαρισμού. 8. Οδηγίες Χρήσης.



1. Θάλαμος πλήρωσης. 2. Επιστόμιο. 3. Ένδειξη πραγματικής θερμοκρασίας. 4. Πλήκτρο θερμοκρασίας «αυξ» (+). 5. Υποδοχή Φόρτισης USB-C. 6. Ένδειξη απαιτούμενης θερμοκρασίας. 7. Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας. 8. Εργαλείο θαλάμου πλήρωσης (στη βάση της συσκευής). Διακόπτης ON/OFF. 10. Πλήκτρο θερμοκρασίας «μειών» (-). 11. Μονάδα ψύξης..

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, είναι απαραίτητο να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία. Συνδέστε το καλώδιο USB-C στην υποδοχή της συσκευής και στη συνέχεια στο τροφοδοτικό (USB-C Supercharger). Η οθόνη φωτίζεται και ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC δονείται σύντομα. Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη παύει να αναβοσβήνει και εμφανίζονται σταθερά και τα έξι πεδία. Η συσκευή υποστηρίζει ταχεία φόρτιση (Supercharge), επιτρέποντας την ταχύτερη αναπλήρωση της ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και στη συνέχεια το καλώδιο από τον ατμοποιητή.


Αυτόματη απενεργοποίηση

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC απενεργοποιείται αυτόματα δύο λεπτά μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου ή την τελευταία εφαρμογή. Η απενεργοποίηση σηματοδοτείται από μια σύντομη δόνηση. Μπορείτε να κάνετε επαναφορά (reset) του

χρόνου απενεργοποίησης πατώντας σύντομα οποιοδήποτε πλήκτρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Μύλος ανθέων κάνναβης


Τοποθετήστε μια ποσότητα από ξηρά άνθη φαρμακευτικής κάνναβης στον Μύλο ανθέων κάνναβης. Στρίψτε τον μύλο δεξιά-αριστερά περίπου 4-5 φορές μέχρι να τεμαχιστούν ομοιόμορφα τα άνθη. Στη συνέχεια, ζυγίστε με ακρίβεια την ποσότητα των τεμαχισμένων ανθέων που σας έχει συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα ιατρό σας, προκειμένου να γεμίσετε τις κάψουλες δοσολογίας.

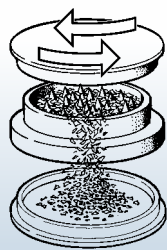


Τεμαχισμός ξηρών ανθέων φυτού κάνναβης με μύλο ανθέων κάνναβης

Κάψουλες δοσολογίας (μιας χρήσης) και γεμιστήρας

Αφού ζυγίσετε τη δόση τεμαχισμένων ανθέων κάνναβης που σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, γεμίστε την σε κάψουλα δοσολογίας με τη βοήθεια του καπακιού του γεμιστήρα (κοάνη) και τοποθετήστε το καπάκι της κάψουλας δοσολογίας. Η διαδικασία γεμίσματος συνεχίζεται ώσπου να έχει γεμίσει ο επιθυμητός αριθμός κάψουλων δοσολογίας και στη συνέχεια μπορεί να γίνει η τοποθέτησή τους στον γεμιστήρα. Ο γεμιστήρας χωράει έως και οκτώ κάψουλες δοσολογίας. Έπειτα ο γεμιστήρας μπορεί να κλείσει με το καπάκι, περιστρέφοντας το καπάκι δεξιόστροφα.

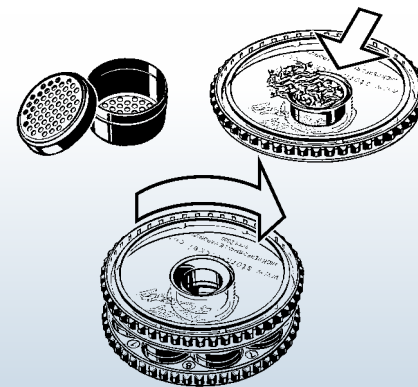



Κάψουλα δοσολογίας κατά το γέμισμα με το καπάκι του γεμιστήρα (κοάνη) και τοποθέτηση του καπακιού στο γεμιστήρα

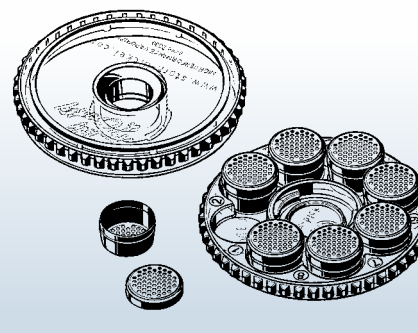

Κάψουλες δοσολογίας με γεμιστήρα

Τοποθέτηση των κάψουλων δοσολογίας

Αρχικά, αφαιρέστε τη μονάδα ψύξης με στροφή 90° προς τα αριστερά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη γεμισμένη με τη συνιστώμενη δόση κάψουλα δοσολογίας με το καπάκι προς τα επάνω μέσα στον θάλαμο πλήρωσης του ατμοποιητή και τοποθετήστε ξανά τη μονάδα ψύξης στρέφοντάς την 90° προς τα δεξιά.

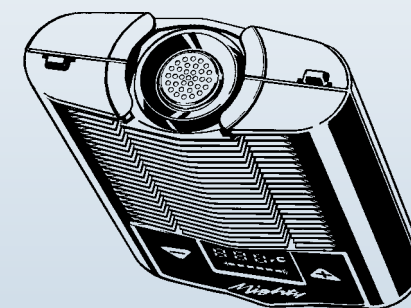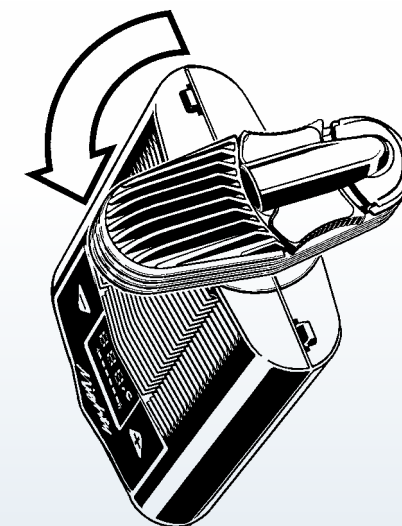

Αφαίρεση μονάδας ψύξης και τοποθέτηση της κάψουλας δοσολογίας στο θάλαμο πλήρωσης

Προθέρμανση

Ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC προσφέρει πλέον τρία προκαθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας για βελτιωμένη εμπειρία:

Βασική θερμοκρασία: 180°C.

Ενισχυμένη θερμοκρασία (Booster):

+15°C πάνω από τη βασική (προεπιλογή 195°C).

Υπερενισχυμένη θερμοκρασία (Superbooster): +15°C πάνω από την ενισχυμένη (προεπιλογή 210°C).

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής συνιστάται η προθέρμανση του ατμοποιητή MIGHTY+ MEDIC με τοποθετημένη κάψουλα δοσολογίας και μονάδα ψύξης. Ο ατμοποιητής ενεργοποιείται πατώντας τον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο και επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση με μια σύντομη δόνηση. Η επίτευξη της ρυθμισμένης απαιτούμενης θερμοκρασίας σηματοδοτείται από σύντομη διπλή δόνηση και την παύση της αναλαμπής της ένδειξης στην οθόνη.

Εφαρμογή και εισπνοή

Συνιστάται η αρχική εισπνοή να γίνεται στη βασική θερμοκρασία (180°C). Όταν ο ατμοποιητής MIGHTY+ MEDIC φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, τραβήξτε το επιστόμιο προς τα έξω και ξεκινήστε την εισπνοή. Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «+» και «-».

Λειτουργίες Booster

Όταν εξασθενίσουν οι ατμοί, ενεργοποιήστε την Ενισχυμένη λειτουργία (Booster) με διπλό κλικ στον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF). Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 15°C. Αν οι ατμοί εξασθενίσουν ξανά, ενεργοποιήστε την Υπερενισχυμένη λειτουργία (Superbooster) με τριπλό κλικ στον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF). Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 210°C. Μόλις δεν εμφανίζονται πλέον αναγνωρίσιμοι ατμοί κατά την εκπνοή στους 210°C, η κάψουλα δοσολογίας έχει αναλωθεί.

Υγιεινή

Πριν από κάθε νέα εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιείται ένα νέο επικερίλιο επάνω στο επιστόμιο. Η μονάδα ψύξης, το επιστόμιο και το επικερίλιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από το ίδιο άτομο. Το επικερίλιο πρέπει να απορρίπτεται μετά από 4 ώρες χρήσης ή αν λερωθεί/φθαρεί.

Τεχνική εισπνοής

Τοποθετήστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη και εισπνεύστε για μερικά δευτερόλεπτα ομοιόμορφα και αργά (μέχρι το μισό της αναπνευστικής σας ικανότητας). Κρατήστε τον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα και εκπνεύστε αργά. Η δράση των κανναβινοειδών αρχίζει συνήθως μετά από 1-2 λεπτά και διαρκεί περίπου 2-4 ώρες.

Τέλος της εισπνοής

Απενεργοποιήστε τον ατμοποιητή MIGHTY+ MEDIC πατώντας τον πορτοκαλί διακόπτη (ON/OFF) για τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο (επιβεβαίωση με δόνηση).

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πλήρως πριν την ανοίξετε.

Στη συνέχεια: Αφαιρέστε τη μονάδα ψύξης στρέφοντάς την 90° αριστερά. Απομακρύνετε την κάψουλα δοσολογίας από τον θάλαμο πλήρωσης. Απορρίψτε το περιεχόμενο της κάψουλας στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, συντήρηση και καθαρισμό, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή MIGHTY+ MEDIC.

Βιβλιογραφία:

VAPORMED MIGHTY MEDIC Οδηγίες Χρήσης:
<https://www.vapormed.com/en/amfile/file/download/file/627/>